

Schwenksitz für Kindergehilfe „NIMBO“, Größe „S“

Montageanleitung

Anbau

1. Entfernen Sie die Schrauben (A).
2. Lassen Sie die Rohre (B) nach unten gleiten.
3. Heben Sie den U-Rohr-Rahmen (E) an.
4. Schieben Sie die Aufnahmerohre (C) nun auf den U-Rohr-Rahmen soweit als möglich nach hinten.
5. Ziehen Sie nun die Sterngriffschrauben (D) unter den Aufnahmerohren (C) an.
6. Montieren Sie die Schrauben (A) wieder.

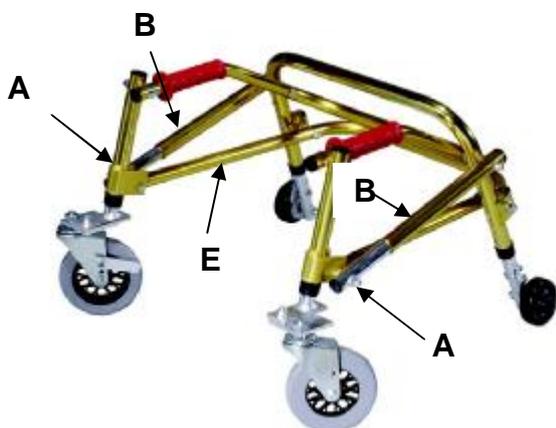


Bild 1



Bild 2



Bild 3

Anwendung

Zum Stehen oder Laufen klappen Sie den Sitz nach oben, ebenso zum Falten. Klappen Sie den Sitz nach unten zum Ausruhen und Sitzen.