

Schwenksitz für Kindergehhilfe „NIMBO“, Größe „ L ‘

Montageanleitung

Anbau

1. Entfernen Sie die Bolzen (A) am hinteren Rahmen.
2. Entfernen Sie alle Befestigungsteile (C) an den Gleitschienen.
3. Stecken Sie die Montagerohre (B) in die unteren Öffnungen (E) am hinteren Rahmen ein, setzen Sie die Bolzen (A) ein und ziehen diese fest.
4. Entfernen Sie die Bolzen (D) und ersetzen Sie sie durch (C). nach dem Zusammenbau sollten die Komponenten in folgender Reihenfolge montiert sein (von innen nach außen): Schraube, Scheibe, Gleitschiene, Scheibe, Mutter, Rahmenrohr, Scheibe und Hutmutter.(Bild 3)
5. Ziehen Sie die Schrauben nun soweit an, dass die Gleitschienen noch leicht gleiten können.

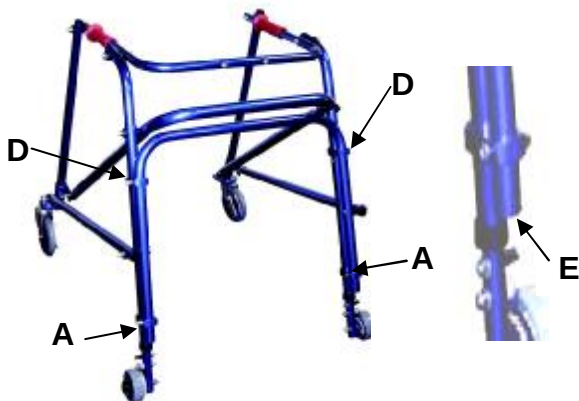


Bild 1

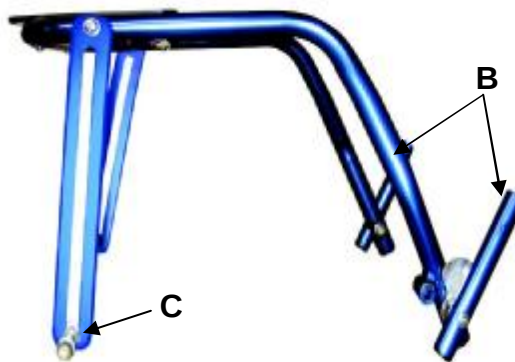


Bild 2



Bild 3



Bild 4

Anwendung

Zum Stehen oder Laufen klappen Sie den Sitz nach oben, ebenso zum Falten. Klappen Sie den Sitz nach unten zum Ausruhen und Sitzen.