

Zubehör: Einhandbremse

MONTAGEANLEITUNG – RECHTS ODER LINKS MONTIERBAR

Lieferumfang

1. Einhandbremse (Bild A) Rechts oder links montierbar.
2. Montageanleitung

Indikation

Um die Einhandbremse zu montieren, müssen Sie die vorhandenen Bremsgriffe ausbauen (ohne Abbildung).

Gehen Sie wie folgt vor :

1. Nehmen Sie beiden Griffe ab.
2. Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Bremsgriffe.
3. Ziehen Sie die Bremsgriffe vom Schieberohr ab.
4. Bauen Sie beide Hinterräder aus.
5. Ziehen Sie die Bremse aus der Radgabel nach unten.
6. Lösen Sie den Bowdenzug (Schraubnippel) und nehmen Sie den Bremse und den Bowdenzug auseinander. (Diese Aktion auf der zweiten Seite wiederholen).

Nehmen Sie jetzt die Einhandbremse und montieren Sie es an Ihre gewünschte Seite (rechts oder links), Dafür gehen Sie die Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge vor. (Siehe Bilder 1-6)

1. Schieben Sie den Bremsgriff wieder auf das Schieberohr.
2. Ziehen Sie die Befestigungsschraube des Bremsgriff wieder fest an.
3. Führen Sie den Bowdenzug durch das Rahmenrohr, die Feder und den Bremsklotz wieder in den Schraubnippel ein und ziehen diese fest.
4. Montieren Sie die Bremse wieder in der Radgabel.
5. Bauen Sie beide Hinterräder wieder an.
6. Stecken Sie die Griffe wieder auf die Rohre.

Bitte beachten Sie beim Verlegen der Bowdenzüge, dass der Faltmechanismus nicht beeinträchtigt wird.

Einstellung der Einhandbremse

Einstellung der Einhandbremse.

Die Bremse an den Einstellschraubem am Bowdenzug (Bild 7) auf die gewünschte Bremswirkung einstellen.

Die Bremse kann auch am Bremsgehäuse (Bild 8) nachgestellt werden.

