

# Seitenpelotten

## MONTAGEANLEITUNG FÜR MULTITEC ZUBEHÖR

**REF** 900600900 (Paar)

### Montage



Lieferumfang:  
2 x Seitenpelotten  
2 x Klemmstück

Die Seitenpelotten werden rechts und links am Rahmenrohr der Rückenlehne befestigt.

Befestigen Sie die Seitenpelotten mit dem Klemmstück in der gewünschten Höhe an dem Rückenlehnerohr.

### Einstellung



Sie können den Winkel der Seitenpelotten je nach Bedarf mit dem Klemmstück einstellen.

Mit der Klemmschraube kann der Abstand der Seitenpelotte zur Rückenlehne eingestellt werden.

Zusätzlich können Sie das Vorderteil der Seitenpelotten durch anheben des Gelenkes nach innen oder außen schwenken.