

# Zubehör: Wertsachenbox

## MIT ARMLEHNENMONTAGE - ART. NR. 950500500



### Wertsachenbox und/oder Stockhaltermontage an den Armlehnen

- Entfernen Sie die Schrauben an den Armlehnenbefestigungen und nehmen diese ab.
- Schieben Sie nun das oder die Anbauteile über die Löcher und fixieren Sie die Teile mit den Schrauben und der dazugehörigen Armlehne.
- Wenn Sie dies beidseitig getan haben, Schrauben festziehen.

### Montage der Trägerplatte für Wertsachenbox

- Montieren Sie die Trägerplatte mit den dazugehörigen Schrauben wie abgebildet.
- Schieben Sie dann die Wertsachenbox auf die Trägerplatte bis sie hörbar einrastet.

Bilder sind Beispielbilder und gelten für alle Scooter mit entsprechender Armlehnenbefestigung!

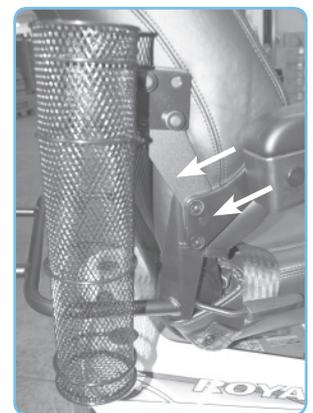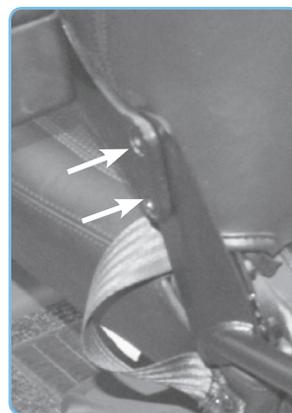

Stand: 06/2014  
Irrtum und Änderungen vorbehalten