

Zubehör: Wertsachenbox

MIT VIERKANTROHRMONTAGE - ART. NR. 950500100 / 950100101


Wertsachenbox Vierkantrohrmontage

- Entfernen Sie den Schutz an dem Vierkantrohr hinter dem Sitz. (Bild 1)
- Schieben Sie nun den Wertsachenboxhalter in das Rohr und fixieren Sie die Teile mit der Feststellschraube. (Bild 2)

Montage der Trägerplatte für Wertsachenbox

- Montieren Sie die Trägerplatte mit den dazugehörigen Schrauben wie abgebildet. (Bild 3)
- Schieben Sie dann die Wertsachenbox auf die Trägerplatte bis sie hörbar einrastet. (Bild 4)

Bilder sind Beispielbilder und gelten für alle Scooter mit entsprechender Vierkantrohrmontage!

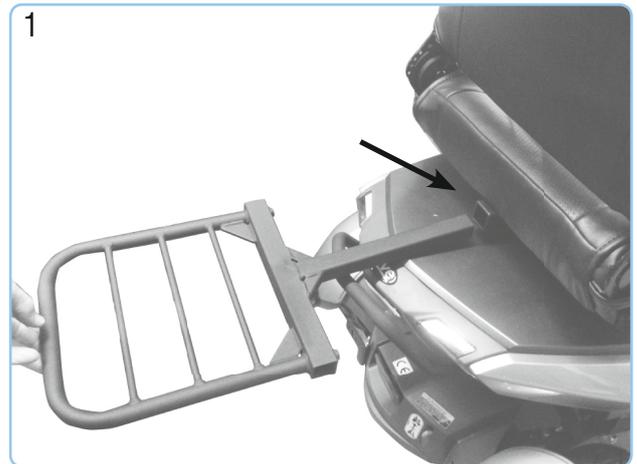

Stand: 06/2016
Irrtum und Änderungen vorbehalten.